



第三種動物用医療機器第 19-708 号

# 取扱説明書

(携帯電話・スマートフォンで設定)

## 携帯電話・スマートフォンからアクセス手順

### □携帯電話・スマートフォンで設定する

○携帯電話にカメラ機能が付いている場合は、カメラモードを[バーコードリーダー]に切り替えて、下記の QR コードを読み取り i モード、ezweb 等で接続します。



○スマートフォンの場合は QR コード読み取りアプリをダウンロードしてください。

○カメラ機能の付いてない携帯電話の場合は i モードの URL 入力に下記を入力してください。

**[<http://www.remote.co.jp/remote/i/>]**


接続は i モード、ezweb 等を選択します。



1. モバイル牛温恵へ会員ログインします。
2. [メール設定] を選択して通報メールの設定をします。



- (-) は必ず削除してください。  
携帯メールアドレスを入力する場合は (-) を削除した後
- サブメニュー
  - ↓
  - 引用
  - ↓
  - 所有者情報引用 (ご本人) 又は 電話帳引用
  - ↓
  - 詳細
  - ↓
  - メールアドレス
- の順に選択してください。  
入力後は[確認]を選択します。

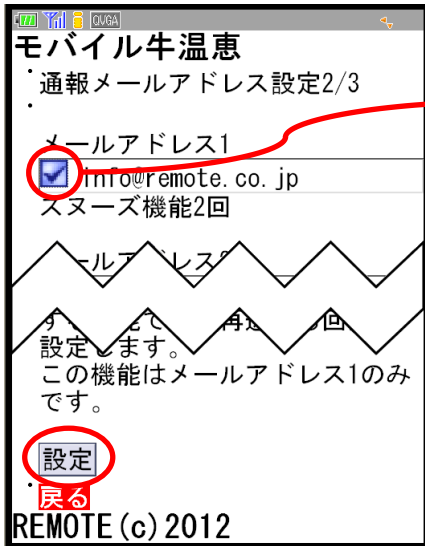

3.メールアドレスを正しく入力されているかを確認します。

新規で入力したアドレスにを入れて**[設定]**を選択します。

正しく入力されている場合はすぐに確認メールが受信されます。

確認メールが受信されない場合は以下の原因が考えられます。

- ①メールアドレスの入力間違い
- ②携帯メール設定でパソコンからのメール受信を拒否する

以上対策を講じて再度挑戦してください。



スヌーズ回数を選択して**[確認]**を選択してください。

スヌーズ機能とは駆付け通報メールによって目覚めてもうたた寝した場合にもう一度目覚めさせるためのメールを再送する機能です。

メールアドレス1のみ再送する回数を設定できます。

4.次回よりログイン入力の手間を省くために**[Bookmark]**等へ登録をします。

ドコモの場合

**[モバイル牛温恵]**と表示された画面から**[サブメニュー]**を選択して**[Bookmark]**→**[Bookmark 登録]**の順で登録を行ってください。

登録したグラフを見る時は**[i モード]**→**[Bookmark]**→**[Bookmark]**→**[REMOTE]**の順で操作してください。

au の場合

**[モバイル牛温恵]**と表示された画面から**[ブラウザメニュー]**を選択して登録を行ってください。

登録したグラフを見る時は**[EZweb]**→**[お気に入りリスト]**→**[REMOTE]**の順で操作してください。

スマートフォンの場合

**[モバイル牛温恵]**と表示された画面から**[メニュー]**を選択して登録を行ってください。


登録したグラフを見る時はブラウザのブックマークから選択してください。

※機種により操作方法が異なります。わからない場合は最寄りのショップへお尋ねください。

## □通報設定




①.設定したいセンサー番号を選択します。

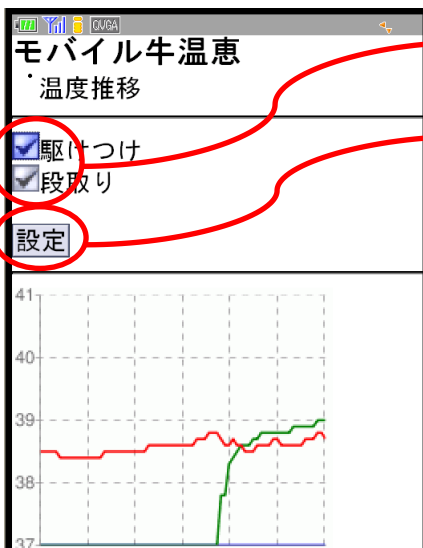

②.掛けつけと段取りに☑を入れます。

③.[設定]を選択します。

メール通報が送信されると☑は自動で消えます。  
途中脱出等誤通報の時は体温センサーを牛に入れ直し、  
☑を入れ設定を行ってください。

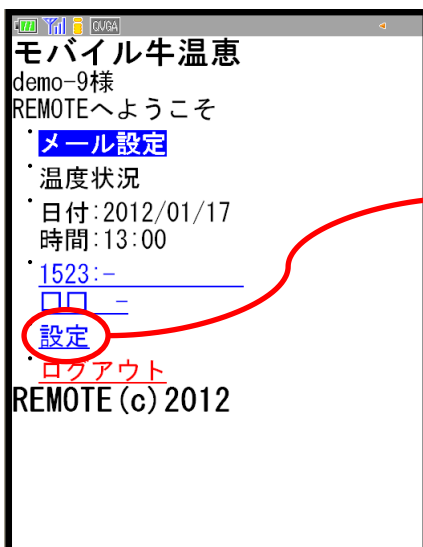

段取り通報後に体温の異常上昇が起こった時に SOS 通報  
を出したい場合は設定を有効にしてください。

※携帯電話のポケット割引サービスに加入していない場合は最寄りの携帯電話ショップでの  
お申し込みをお勧めします。

ドコモ：パケ・ホーダイダブル定額／au：ダブル定額スーパーライト／Softbank：パケット  
し放題 S 等。

## メール通報内容

前項までの設定を行っておくと、設定条件から外れた場合以下のメール通報を行います。

### ○体温センサー

#### **【段取り通報】**

分娩前の体温低下が現れた時、メール通報します。

#### **【駆けつけ通報 1】**

段取り通報後に破水及び娩出等によりセンサーが脱出した時、メール通報します。

#### **【駆けつけ通報 2】**

段取り通報前に破水及び娩出等によりセンサーが脱出した時、メール通報します。

#### **【SOS 通報】**

SOS 通報を有効に設定した場合、段取り通報後に 39.3℃（黒毛和牛）、39.5℃（乳牛）以上の体温でメール通報します。

#### **【上限温度通報】**

段取り通報前の発熱や SOS 通報を無効に設定している時の発熱時にメール通報します。

#### **【出産予定日通報】**（総合版のみ）

出産予定日 7 日前になると朝 7 時の時点で出産予定日が近づいたことをメール通報します

#### **【発情確認メール】**（総合版のみ）

発情予定日にメール通報します。

#### **【予防接種日メール】**（総合版のみ）

母牛の出産前の予防接種日をメール通報します。

### ○外気温センサー

#### **【上下限温度通報】**

上下限設定温度域から外れた時、メール通報します。

※ 温度グラフ上部の通報詳細に**【5分から12時間】**の範囲で設定していなければメール通報しません。


※ すべての通報は設定しないと通報しません。ご確認の上、設定してください。

※ 本システムは5分毎に計測した体温を監視センターで処理するので、通報が届くまでに5分～10分かかります。従って目の前で脱出してもすぐに通報はありません。システム構成上短縮はできませんのでご了承ください。

※ 停電、機器の故障、インターネット回線異常等で通信が切断される場合があります。通信が切断した時はメール通報も受信できませんので携帯電話等で体温データの確認を1日1回以上行ってください。

## 出産予定母牛へセンサー挿入手順

### 準備するもの

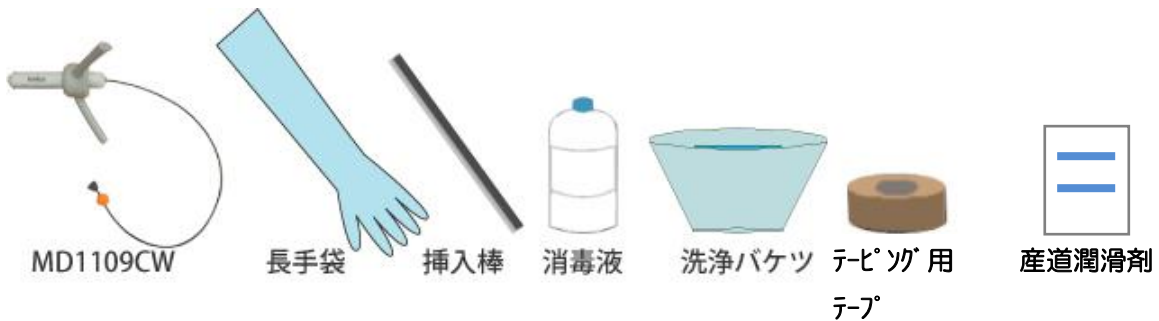


牛にセンサーを挿入します。

※センサー番号と牛番を確認しメモに残してください。


### 装着手順

- ① 牛をスタンションなどで固定する。
- ② 外陰部を洗浄消毒する。
- ③ 体温用センサー、ストッパー、長手袋、挿入棒を消毒する。
- ④ ストッパーを体温用センサーへセットする。
- ⑤ 産道潤滑剤をストッパーと外陰部内側へ塗布する。

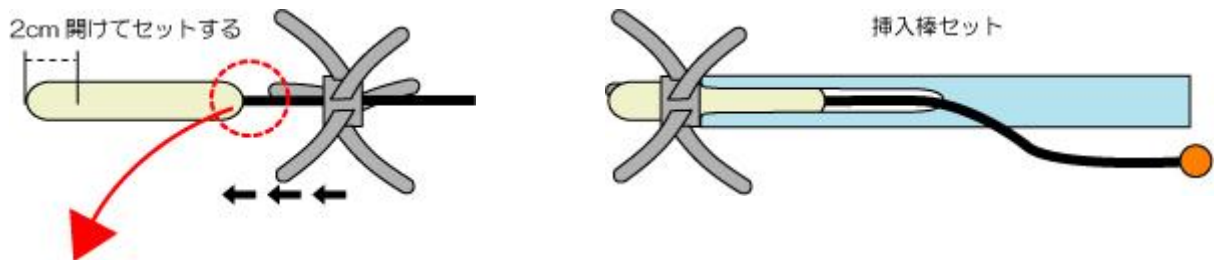

注意：チューブ内はアンテナとなっていますので、押し付けたりしないでください。

- ⑥ 体温用センサーを挿入棒等で膈内奥のポケットへ挿入する。
- ⑦ アンテナ保護チューブを軽く引っ張り、引っ掛かり抵抗を確認し、抵抗が緩ければ挿入が浅いのでチューブを引っ張り取り出し、挿入をやり直してください。
- ⑧ 落下防止の為、保護チューブを尻尾の根元にテープで固定します。

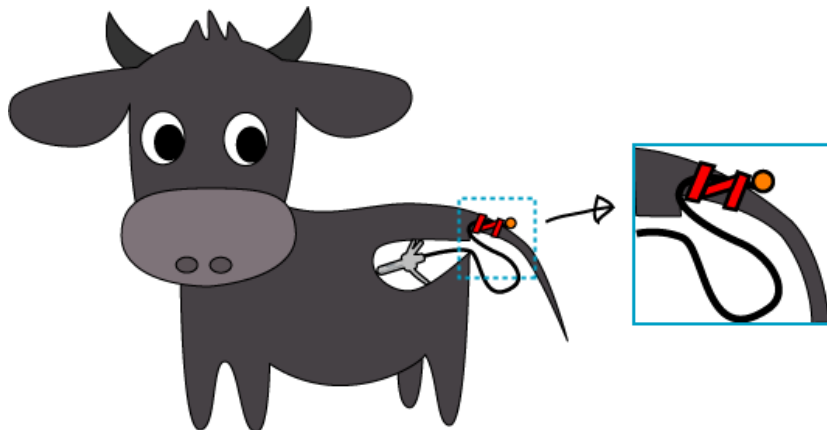

※保護チューブには余裕をもたせてください。

※テープは伸縮しないテーピングテープを推奨します。

## ストッパーセット方法


① 一次破水での脱出確率が安定し、途中脱出も軽減できます。

② 途中脱出する牛へ再挿入する場合に使用します。


※個体差により体温用センサーを膣内留置できず脱出する場合がありますので。

膣脱牛に使用する場合は膣脱ベルトとの併用をお勧めします。

①

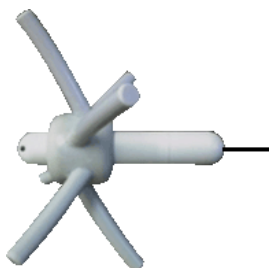

②

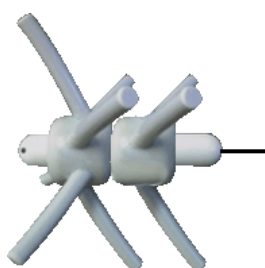

## 注意事項

- 牛以外への使用はしないでください。
- 無理な使用は膣内を傷つけますので控えてください。
- 牛への装着は事故防止の為、必ず二人以上で行ってください。
- 分解または改造しないでください。
- 脱落防止チューブ内はアンテナとなっていますので、鋭角に曲げるなど、必要以上に引っ張ることは破損の原因となります。(最大 10Kg)
- 膣内挿入日数は、最長 15 日、それ以上の連続挿入はしないでください。
- 挿入中は、生体の変化に留意し、異常と思われる場合は挿入を中止し、獣医師の指示に従ってください。
- 本製品は、微弱無線帯域でデータ送信しますので使用される環境によっては測温データの欠落が生じる場合があります。
- 使用後は、本体からストッパーを取り外し熱水洗浄 (60°C10 分 MAX) 及び薬液消毒 (中水準) してください。
- 汚れを落とすときは、中性洗剤を使用しベンジン、シンナー等は使用しないでください。
- 超音波洗浄をしないでください。
- 次のような場所には保管しないでください。(直射日光下・振動・衝撃、化学薬品及び腐食性ガス等の発生環境下)
- 本製品は分娩監視の補助機器であり正常な分娩を保証するものではありません。ご使用については自己責任をお願いいたします。

(情報システム改善等による手順変更が発生する場合があります)

ご使用上、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお尋ねください。

株式会社リモート

TEL 0977-85-8700 FAX 0977-85-8701

E-Mail [info@remote.co.jp](mailto:info@remote.co.jp)

ホームページ <http://www.remote.co.jp>

